


Nota informativa per l'utilizzazione del Supporto murale KY581900

Questo supporto murale può essere installato su qualsiasi tipo di parete, anche in ambulanza, ed è stato progettato per poter essere utilizzato con qualsiasi respiratore della gamma OSIRIS (OSIRIS 1, 2, e 3).

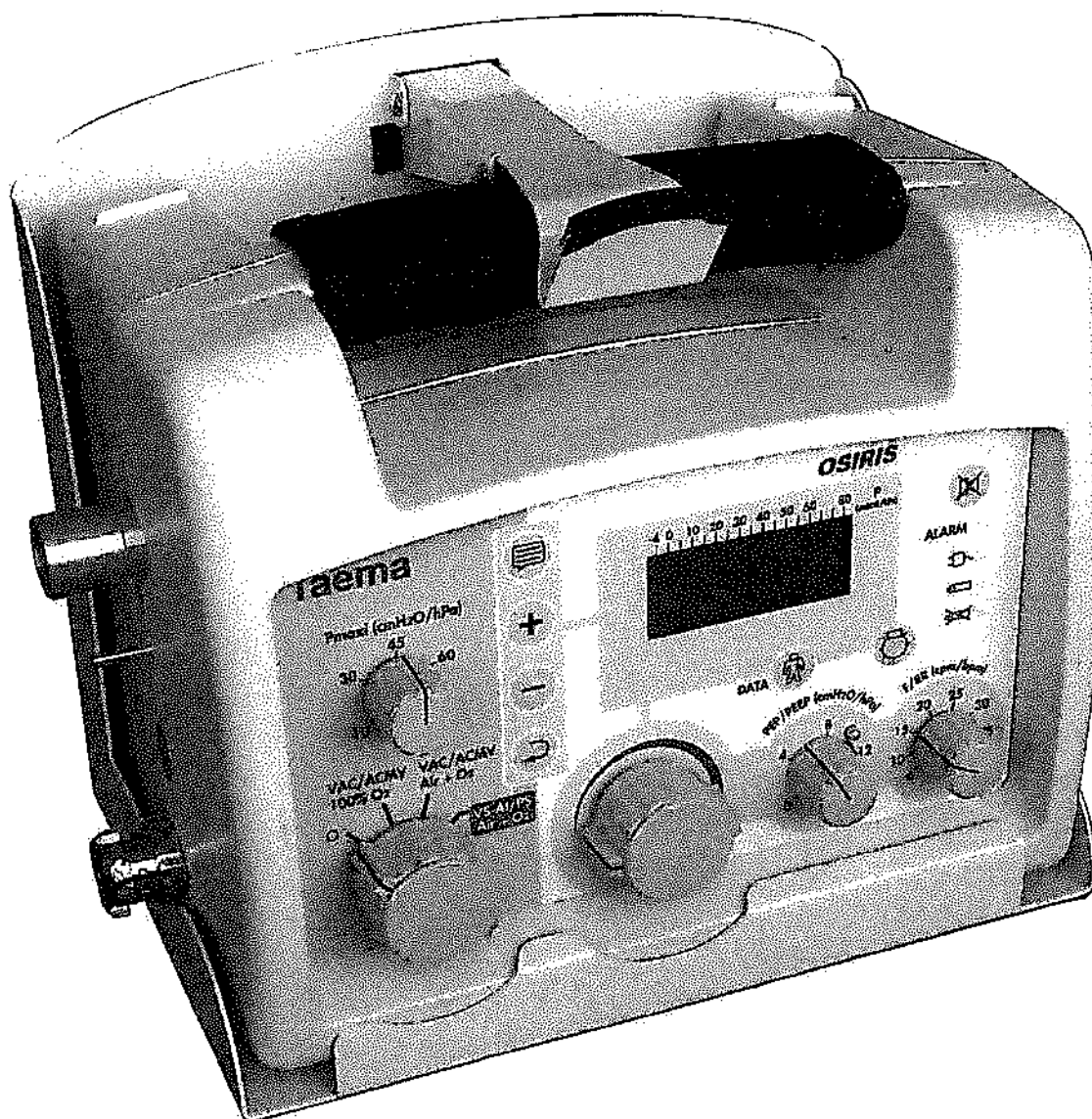


1 Montaggio del supporto murale

1.1 In ambulanza

Il supporto murale va fissato su una delle pareti solide del veicolo, utilizzando almeno 4 viti M8.


Per un fissaggio ottimale, è opportuno distribuire in maniera simmetrica (internamente o esternamente) i punti di fissaggio su ognuno dei 4 quadranti delimitati dai trattini nell'illustrazione qui in basso.

Il supporto murale va avvvitato direttamente nella parete solida del veicolo.



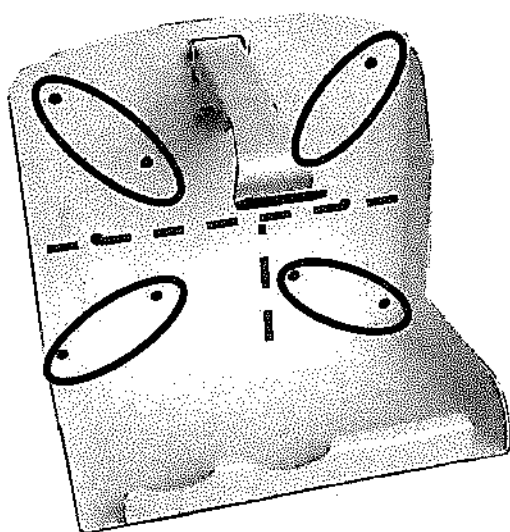


1.2 In ospedale su una guida murale

Sono sufficienti due viti (cfr. illustrazione qui in basso) per fissare il supporto murale al morsetto di fissaggio montato sulla parete.

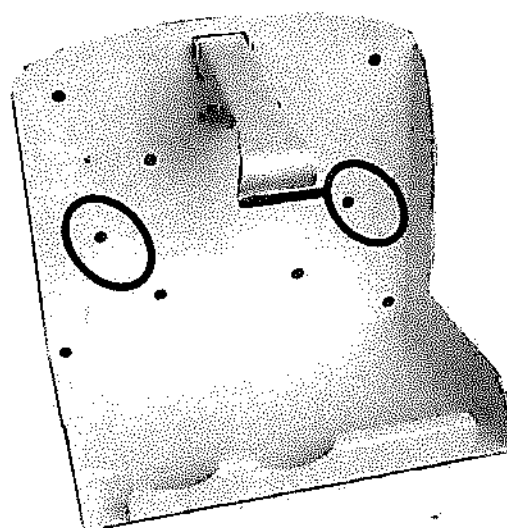


Rif. per gli ordini:
KB016800: morsetto di
fissaggio

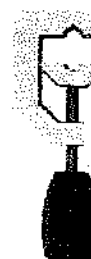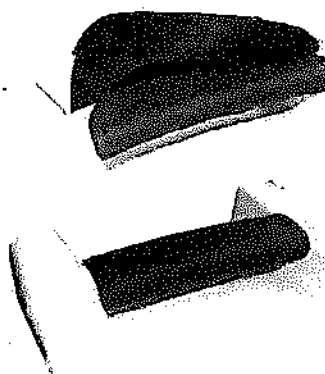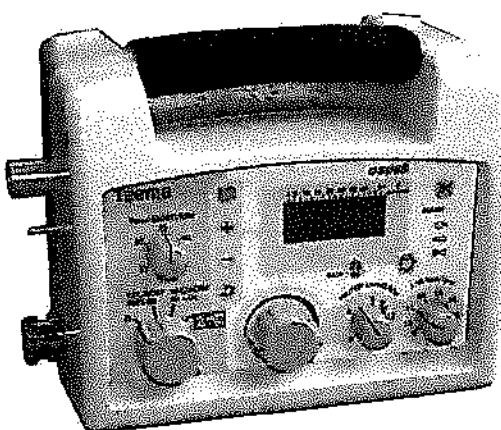

2 Utilizzazione

2.1 Installazione e rimozione del respiratore dal supporto

Il respiratore va installato solo su un supporto murale ben fissato.
Installare il respiratore come indicato nell'illustrazione qui in basso.

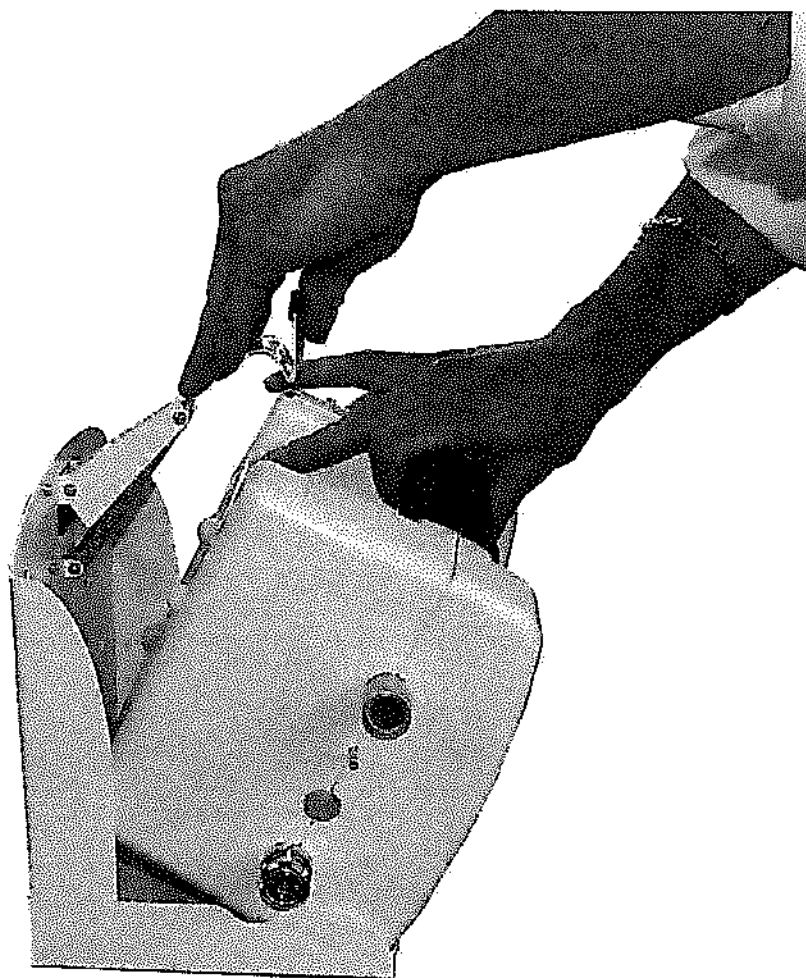

3 Norme

Questo supporto murale è conforme alle seguenti:

- Norma EN 1789 articolo 4,3
- Direttiva 93/42 CEE

4 Per contattarci:

Taema
Parc de haute technologie
6, rue georges BESSE QUESTO 80
92182 Antony CEDEX - FRANCIA

Tel : (33) 01 40 96 66 00
Fax : (33) 01 40 96 67 00
Internet : www.taema.fr